



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-Mail: info@kern-sohn.com

Tel: +49-[0]7433- 9933-0

Fax: +49-[0]7433-9933-149

Internet: www.kern-sohn.com

Zusatzbeschreibung Montage Handlauf

KERN MWA-A01

Version 1.0

04/2015

D

MWA-A01-ZB-d-1510



KERN MWA-A01

Version 1.0 04/2015

Zusatzbeschreibung Montage Handlauf

1 Lieferumfang



2 Montage



- ⇒ Gehäuse öffnen und Lötkontakte lösen bzw. öffnen. Nach der Montage die Kontakte wieder genauso anschließen.



PG-Verschraubung des Lastzellenkabels lösen bzw. öffnen




- Leitungsfarben können von der Abbildung abweichen. Deshalb Position der Leitungsfarben für später notieren.
- Einzelne Leitungen des Lastzellenkabels ablöten, ggf. vorhandenen Heißkleber vorher entfernen
- Lastzellenkabel herausziehen.

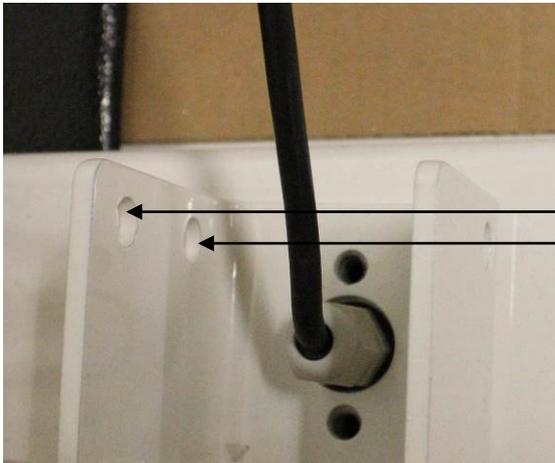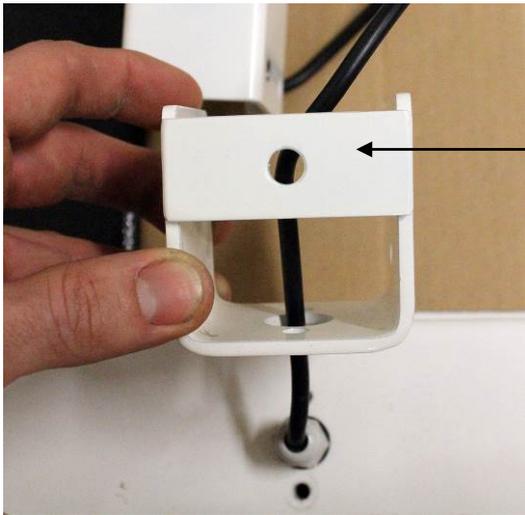

Anschlußkabel lt. Abbildungen durchführen und an der Lastzelle anschließen.

Den Winkel verwenden, bei dem die zwei seitlichen Löcher nach außen zeigen.

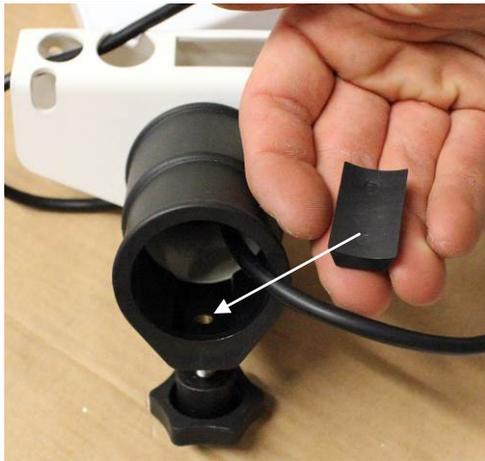

Gummiabdeckung lt. Abb. in die Stativhalterung drücken



Stativhalterung auf das Stativrohr stecken und mit Schrauben lt. Abb. fixieren



Anzeigegerät mit den 4 kleinen Schrauben aus der Tüte an der Stativhalterung anschrauben.



Winkel links (2 Löcher links)




Winkel rechts (2 Löcher rechts)



Die beiden Winkel mit den 4 Schrauben mit Unterlagsscheiben (s. Abb.) festschrauben.



Das Kabel im Stativrohr verschwinden lassen

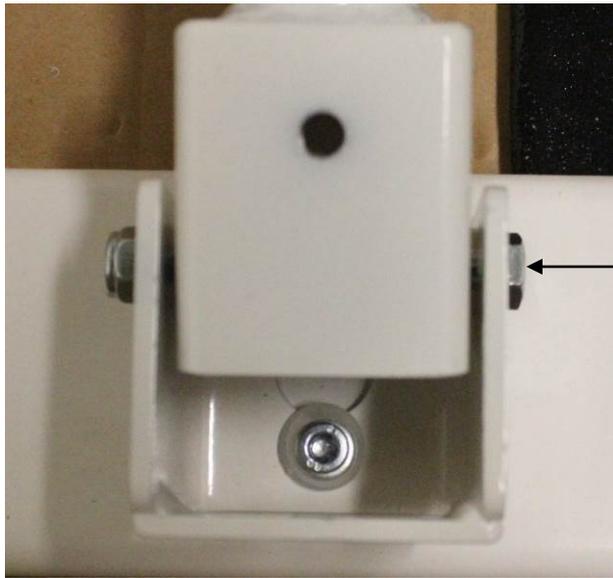

Die beiden Rohre mit den 2 langen Schrauben an den Winkeln festschrauben



Rohre hochklappen und mit den 2 schwarzen Schrauben fixieren.




Nach der Montage des Handlaufs einen Funktionstest (evtl. Justage) durchführen.

Danach Teile nach den folgenden Abbildungen verpacken:

⇒ Lötkontakte wieder anschließen



Beide Schrauben entfernen und Bügel hinunterklappen

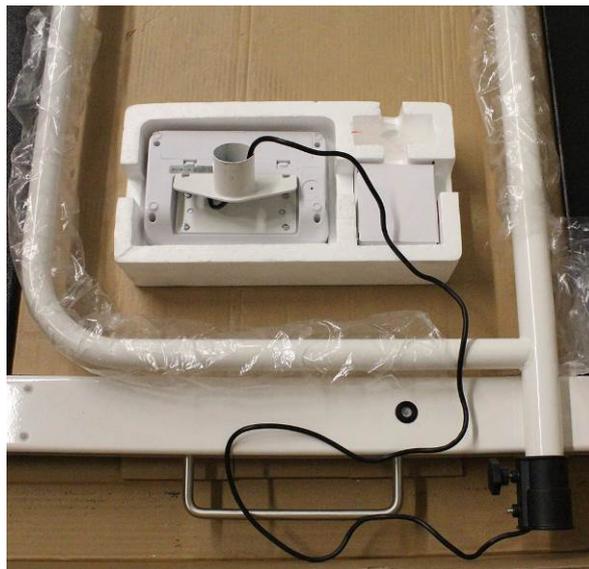




Gitter auflegen und überstehende Bereiche abschneiden



Abgeschnittenes Teil entfernen

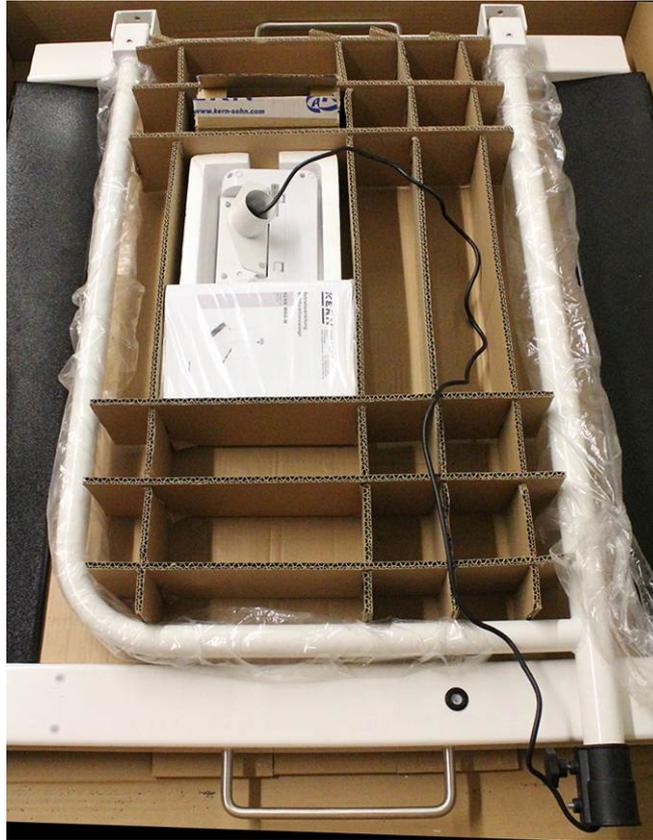

Lose Teile mit Klebeband fixieren.