

KERN[®]

KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-Mail: info@kern-sohn.com

Tél.: +49-[0]7433- 9933-0

Télécopie: +49-[0]7433-9933-149

Internet: www.kern-sohn.com

Instructions de montage **Butée de pied, butée de tête**

KERN MBC-A05

Version 1.0

04/2014

F



MBC-A05-IA-f-1410



KERN MBC-A05

Version 1.0 04/2014

Instructions de montage de la butée de pied et de tête

Table des matières

1	Caractéristiques techniques.....	3
2	Etendue de la livraison.....	3
3	Description.....	3
4	Montage.....	4
5	Nettoyage/Désinfecter.....	4

1 Caractéristiques techniques

KERN	MBC-A05
Dimensions (mm) complètement monté	600 x 280 x 128
Poids net (g)	350

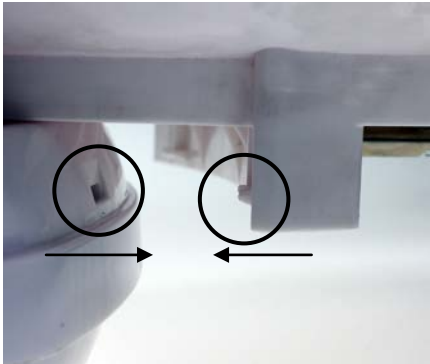

2 Etendue de la livraison

- 1 plateau de pesée avec butée de pied et de tête
- Instructions de montage

3 Description

La butée de pied, la butée de tête KERN MBC-A05, qui délimite le côté du plateau de pesée, augmente la sécurité de votre bébé.

4 Montage

	<p>Pour le montage fixer la butée de pied, la butée de tête selon l'illustration sur la balance.</p>
	<p>Butée de pied, butée de tête montée.</p>

5 Nettoyage/Désinfecter

Nettoyer la plateau de pesée et le terminal uniquement à l'aide d'un nettoyant à usage ménager ou un désinfectant disponible dans les commerces.
Suivre les indications du fabricant.

Ne pas utiliser de produits abrasifs ou de détergents agressifs tels que l'alcool, le benzène ou assimilés, car ils peuvent endommager la qualité de la surface.

Nettoyer régulièrement le plateau de pesée pour éviter une contamination exogène (mycose ...). Préconisation à respecter: nettoyer après chaque pesage qui pourrait entraîner une contamination potentielle (par exemple: lors des pesages avec contact direct avec la peau).



Ne pulvérisez pas de produits de désinfection sur l'appareil.

Veillez à ce que le produit de désinfection ne pénètre pas à l'intérieur de la balance.

Nous conseillons d'essuyer avec un désinfectant.

Enlevez les salissures sur-le-champ.